



SUTURA PERINEALE AVANZATA



DESCRIZIONE

Questo trainer di sutura perineale è di grande aiuto nella formazione ostetrica. Il modello ha strati di silicone di diverse densità e resistenze per un effetto più realistico. Può essere suturato più volte e le suture possono essere rimosse per un nuovo ciclo di allenamento. Assicurati di usare un ago rotondo per questo modello poiché li aghi taglienti danneggeranno il silicone.

Funzionalità aggiuntive:

- Cervice visibile
- Sanguinamento dalla cervice
- Sanguinamento dall'episiotomia
- Sfintere anale accessibile

Manutenzione:

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce