



## TRAINER PUNTURE INDOSSABILE



### DESCRIZIONE

Questo trainer per punture IV è realizzato in silicone super morbido con un tubo curvo in silicone incorporato. Le vene non sono visibili ma si possono sentire attraverso la pelle. Ideale per l'inserimento di una flebo o il prelievo di sangue. È adatto sia per l'uso su una persona che su un manichino. Il foglio di plastica termica protegge il braccio del paziente simulato dalla penetrazione, basterà scaldare la plastica in acqua calda e avvolgerla attorno al braccio per modellarla. Può essere riutilizzato più volte o facilmente riparabile con silicone.

### Come utilizzare il braccio d'addestramento IV:

- Avvolgere il foglio di termoplastica attorno al braccio.
- Posizionare sopra la parte muscolare rossa.
- Inserire i tubi e coprire con la pelle.
- Scollegare un lato del tubo dal connettore rimuovere l'aria dal tubo.
- Riempire il circuito con sangue.
- Aggiungere pressione con la siringa.

Quando si utilizzano aghi sottili i fori si chiudono da soli. Questo modello non avrà una pressione sufficiente per ottenere il reflusso quando si inserisce l'ago. Troppa pressione sulla vena può causare perdite da punture precedenti.

### Manutenzione:

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce