



TRAINER PUNTURE PEDIATRICHE



DESCRIZIONE

Questo trainer per punture riproduce un braccio infantile realistico con vasi sanguigni in silicone incorporati. Questo modello ha 2 vene incorporate per l'addestramento all'incannulazione IV. Le vene sono parzialmente visibili e possono essere palpate.

Come utilizzare trainer:

- Riempire la siringa da 30 ml di sangue.
- Collegare le siringhe ai leur
- Riempire il tubo del vaso con il sangue fino a riempire la siringa da 10 ml.
- Esercitare una leggera pressione su entrambe le siringhe, spingendo un po' più con decisione sulla siringa da 10 ml.
- Ciò fornirà il flashback per l'utente. Una volta ottenuto il flashback non è più necessario esercitare pressione, a meno che non simuli un prelievo abbondante.
- Utilizzare cannule di calibro 22 o più piccole garantirà la longevità del trainer.
- Dopo l'uso i tubi possono essere girati o spostati nel modello.
- Per sostituire il tubo, scollegare i connettori luer lock dal tubo ed estrarre il tubo.
- Lubrificare leggermente la parte esterna del tubo sostitutivo con lubrificante e inserirlo.
- Una volta che la punta è apparsa sul palmo, far passare il tubo nel foro vuoto e spingere finché l'estremità del tubo non fuoriesce all'altezza del gomito. Tirare alla lunghezza desiderata.
- Ricollega i connettori luer lock.

Questo modello può ottenere un flusso di ritorno durante l'incannulamento purché venga mantenuta la pressione sulle siringhe.

CONTENUTO

- Trainer
- Tubo sostitutivo
- Silicone per riparazioni 40 grammi
- Siringa da 30 ml
- Siringa da 10 ml

MANUTENZIONE

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce