

TRAINER PUNTURE



DESCRIZIONE

Questo trainer per punture IV presenta due strati; uno strato di pelle e uno di carne più morbido. Sotto lo strato della pelle sono incorporati due tubi di silicone morbido di diverso diametro che possono essere collegati sia alla siringa che tra loro.

Dopo una serie di sessioni i tubi potrebbero iniziare a perdere ma possono essere sostituiti togliendo i luer, estraendoli e, aiutandosi con un lubrificante, inserendo quelli nuovi. Ricollega i luer ai nuovi tubi e sarai pronto per fare ulteriore allenamento.

Istruzioni per l'uso:

- Riempire la siringa con sangue e collegarla al tubo d'interesse.
- Riempire il tubo e chiudere l'altra estremità.
- Ora è possibile praticare l'inserimento IV o il prelievo di sangue.

Il tampone può essere utilizzato anche per la simulazione di iniezioni e vaccinazioni. I piccoli fori degli aghi si chiuderanno da soli.

Manutenzione:

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce